

# **ОБУКА ЗА MEDTRUM TOUCHCARE CGMs ЗА ИОС КОРИСНИЦИ**

**КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ**



Веб страница: <https://medtrum.mk/>

Е-маил контакт: [medtrum@cubismedical.com.mk](mailto:medtrum@cubismedical.com.mk)

Телефон: 071 269 858

# MEDTRUM CGM TouchCare

ГОЛЕМ ИЗБОР ЗА АПЛИКАЦИИ

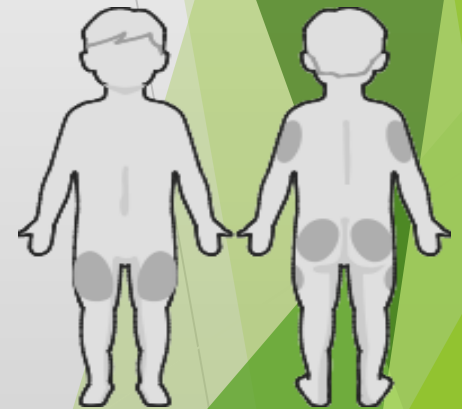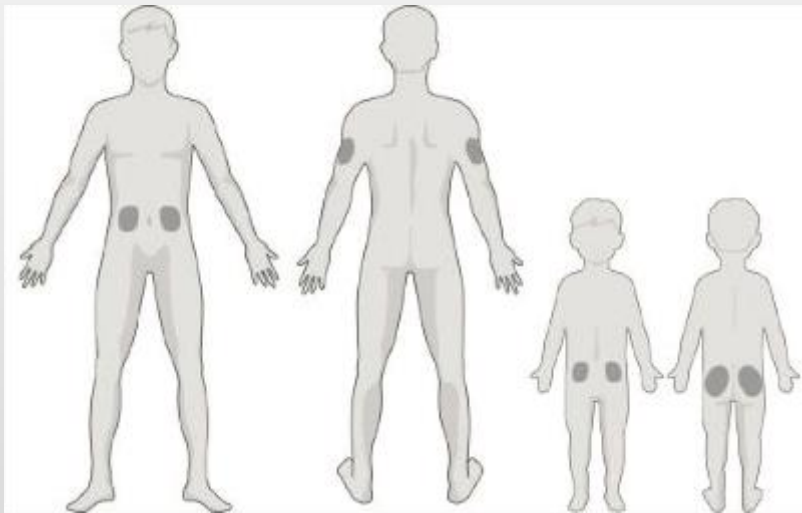

Simplifying Diabetes  
**Medtrum**

## Предуслови за користење на Medtrum TouchCare CGMs за ИОС корисници


- Пациентот мора да има паметен телефон.
- Пациентот мора да има Интернет конекција на паметниот уред.
- Пациентот мора да има вклучено WLAN (Wi-Fi) и мобилни податоци (mobile data).
- Пациентот мора да има своја е-маил адреса и достапност до истата поради регистрација.
- Вклучете ја Bluetooth опцијата на паметниот уред.
- Проверете дали Бесчујно (Sound off) и Не вознемирувај (Do not disturb) се исклучени. Звукот (Sound) мора да е вклучен за да не пропуштите предупредувања.





# Обука step by step

## Основи чекори при инсталирање и поставување на CGM системот


1. Инсталација на Medtrum EasySense апликацијата на вашиот паметен уред. Преземете ја апликацијата преку Apple Play Store. Внесете Medtrum EasySense на Apple Play Store, па потоа допрете Install.

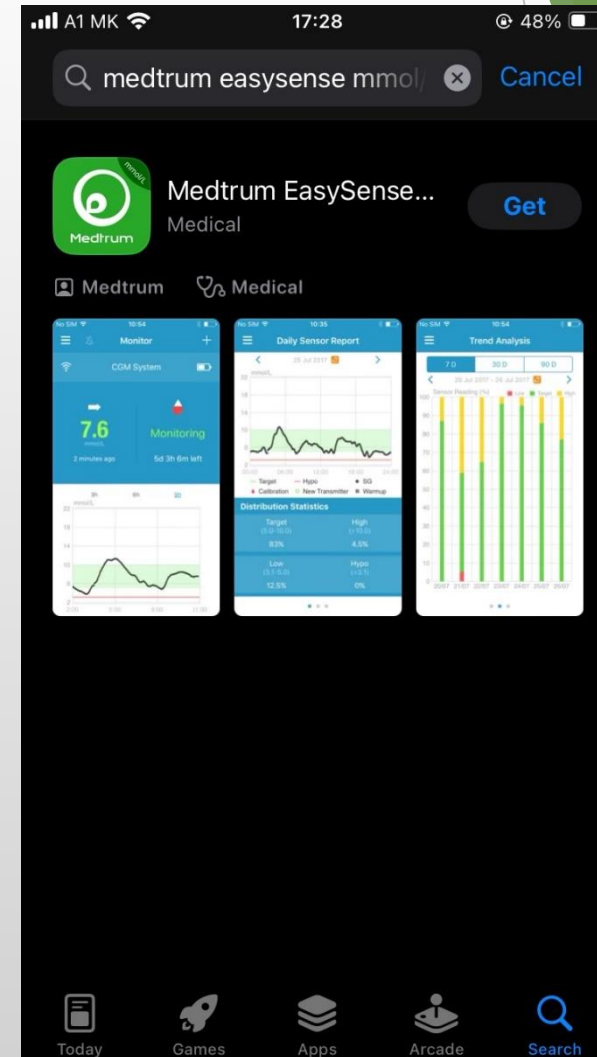

2. Штом ќе ја симнете апликацијата EasySense, ќе Ви побара потврда дали е вклучен Bluetooth-от. Допрете на OK за да се активира. Потоа ќе се појави екран како на сликата подолу каде апликацијата EasySense бара да дозволите да добивате нотификации за звукот и предупредувањата. Допрете на Allow (дозволи).



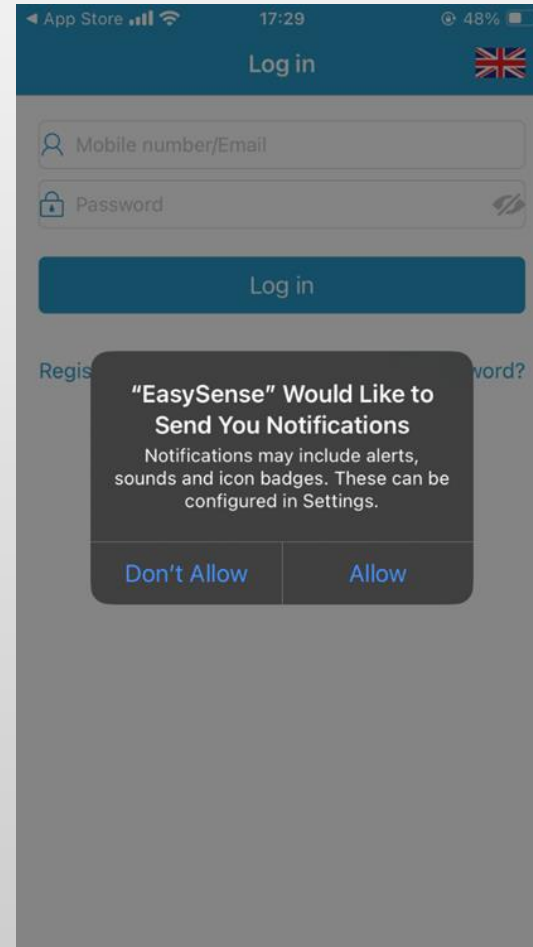
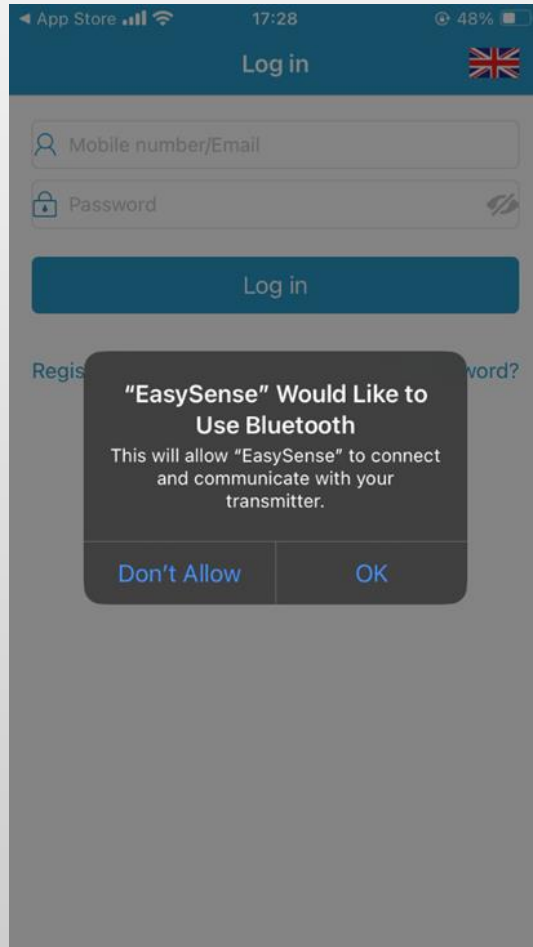


3. Наредно е регистрација на пациентот со неговата е-маил адреса (Register). Допрете на Register за да влезете на екранот за регистрација.



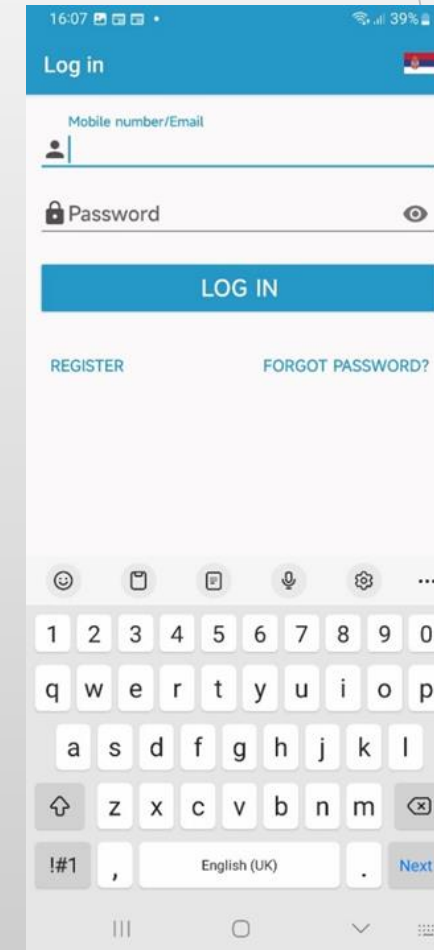


3. Внесете ја вашата е-маил адреса, допрете на Get code, за да добиете код за верификација. Кодот за верификација ќе пристигне на вашата е-маил адреса.




4. Ќе добиете екран како подоле на сликата на паметниот уред, каде имате 60 секунди да го внесете кодот за верификација. (во полето Verification code). Штом го внесете кодот за верификација, го внесувате Вашето име и презиме ( Your full name), а под него внесувате Ваша лозинка (password) и на крај допрете на Next.

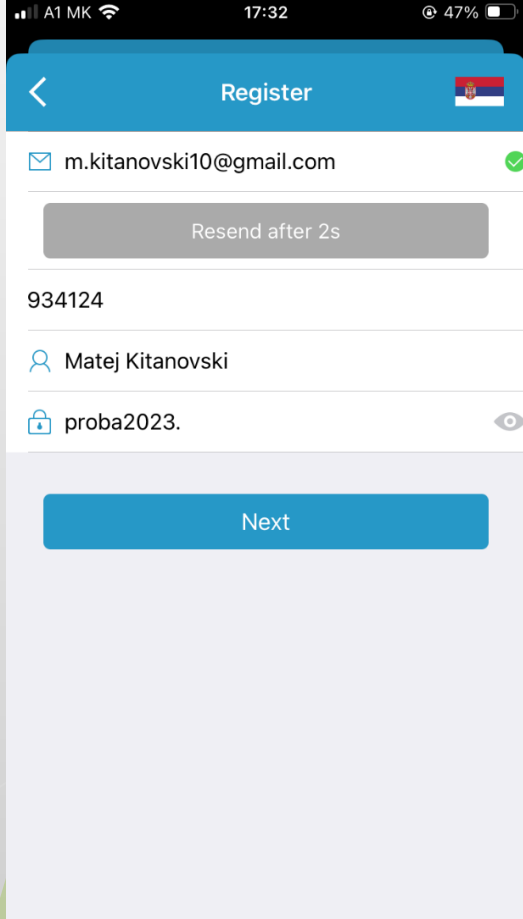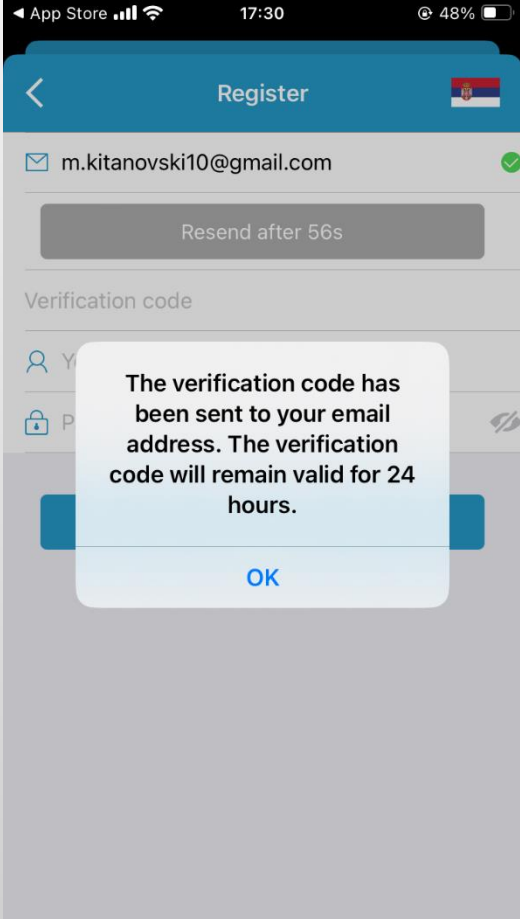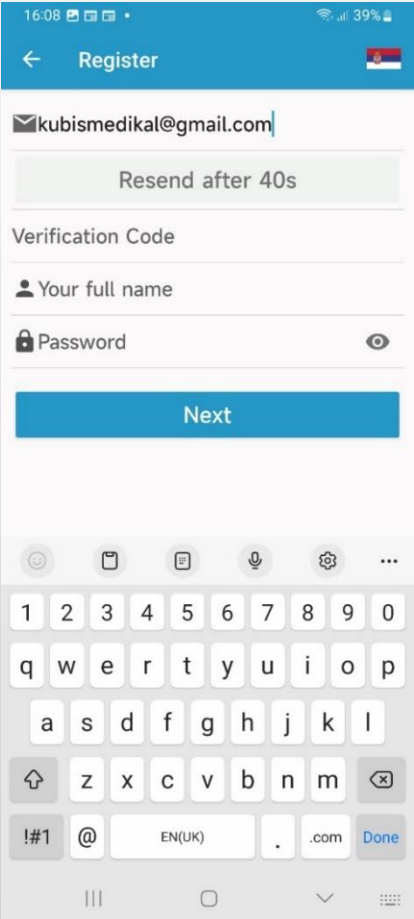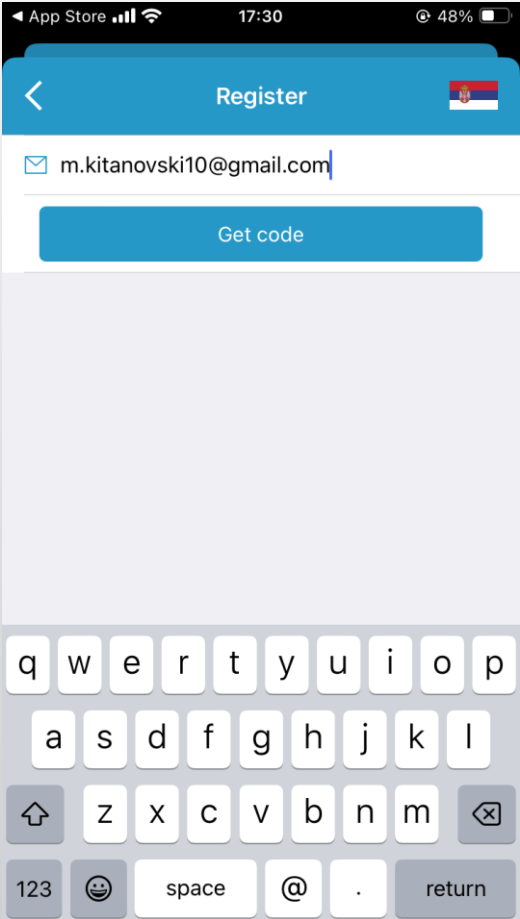


5. Сега може да влезете и да се регистрирате со Вашата е-маил адреса и лозинка како на првата слика. Направете screen shoot за да ја запомните лозинката. Ќе добиете екран како на втората слика, каде е наведена политиката за приватно и условите за користење. Обележете ги квадратчињата и допрете на Create Account и регистрацијата е успешна.

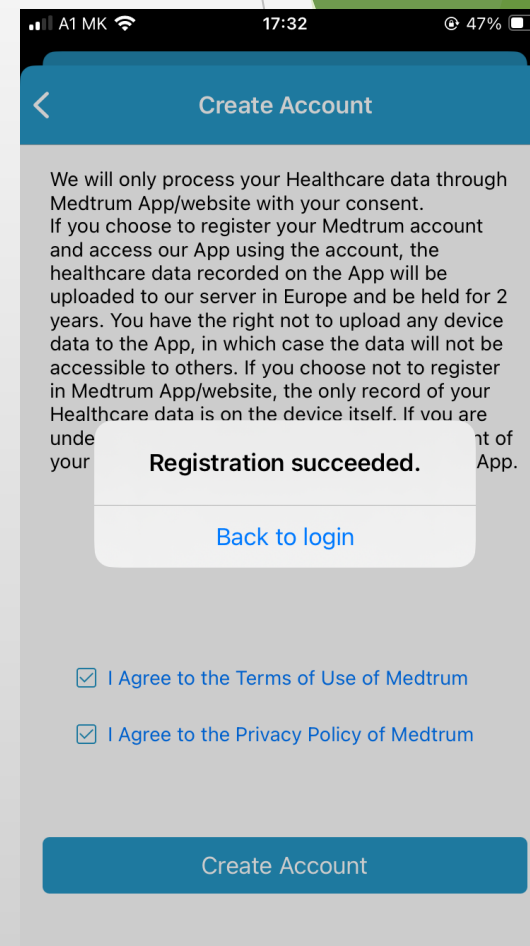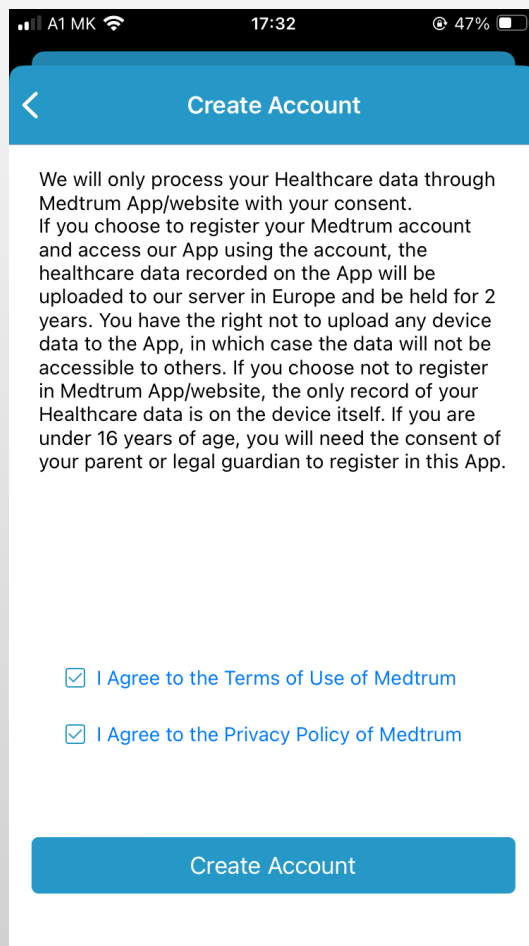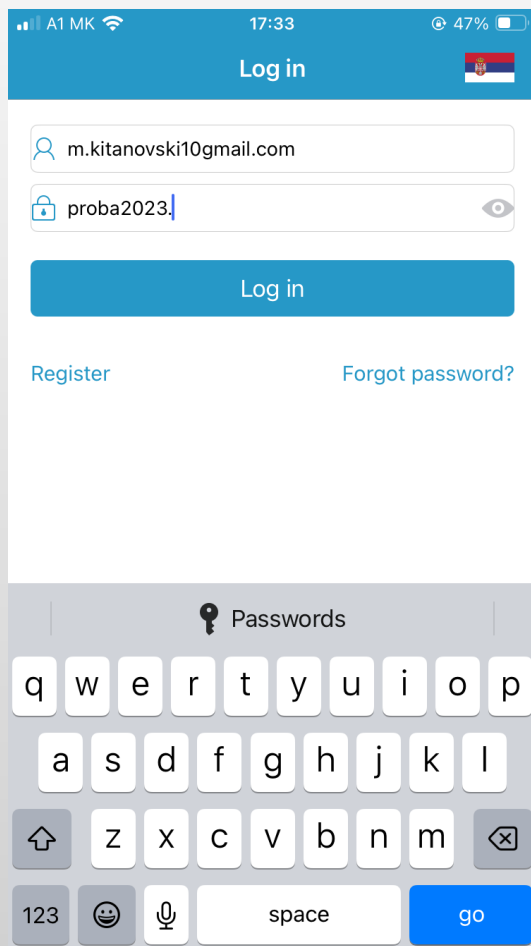



8. За да провериме дали се овозможени сите подесувања, одете во менито Settings на Вашиот pameten уред. Одберете Applications, влезете во иконата на EasySense апликацијата и влезете во Notifications и допрете на Allow Notifications за да ги активирате. Во најголем број случаи Bluetooth-от е активиран. Ако не е активиран, одберете го за да може да се направи конекција со трансмитерот.

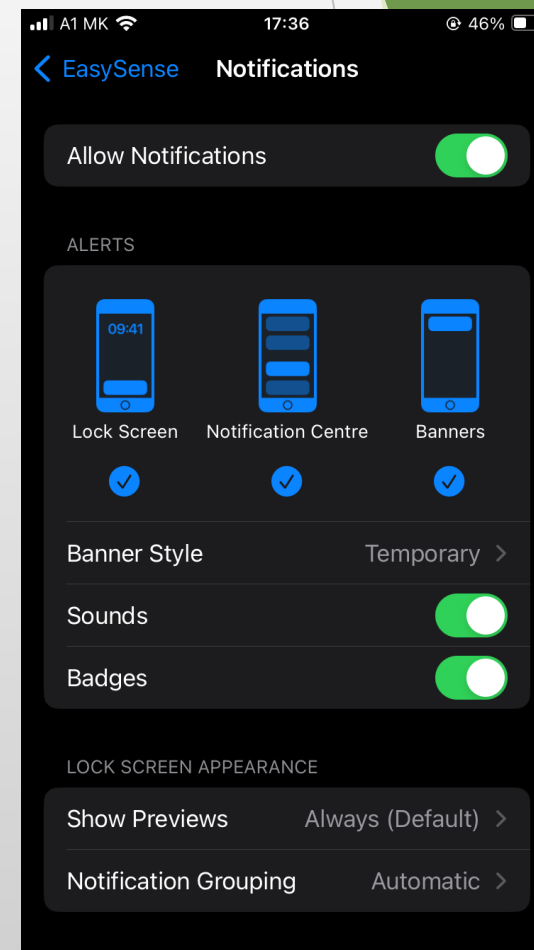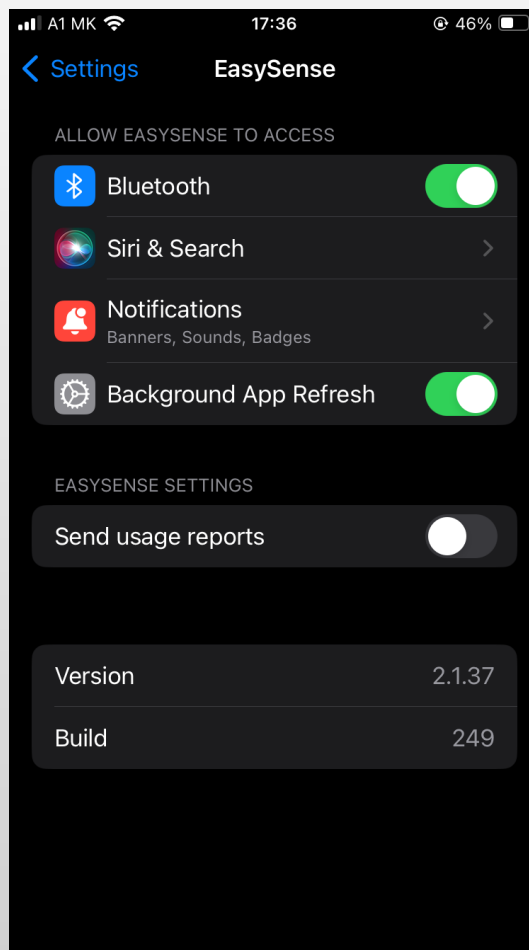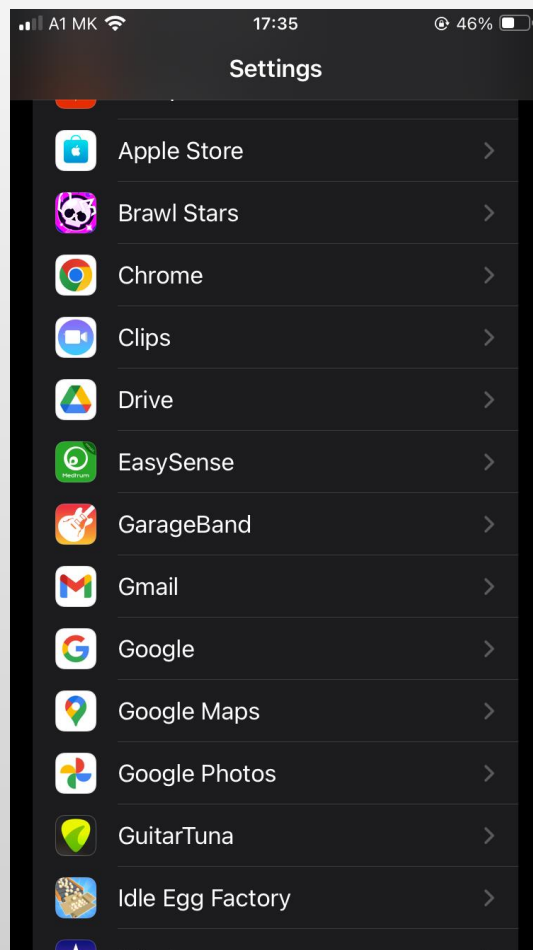

9. Поврзување на трансмитерот. Допрете на Add transmitter и внесете го серискиот број (SN) од трансмитерот. Серскиот број се наоѓа на задната страна од кутијата од трансмитерот, како што е прикажано е на третата слика. Може мануелно да се внесе SN или скенирајте го QR кодот.

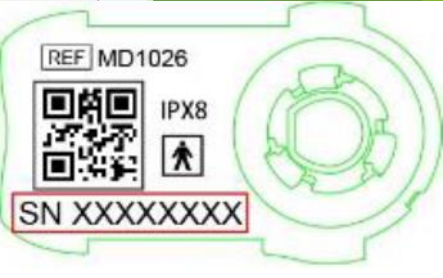


Мануелно внесување на серискиот број (SN)

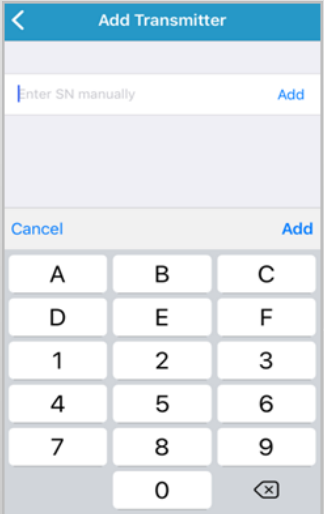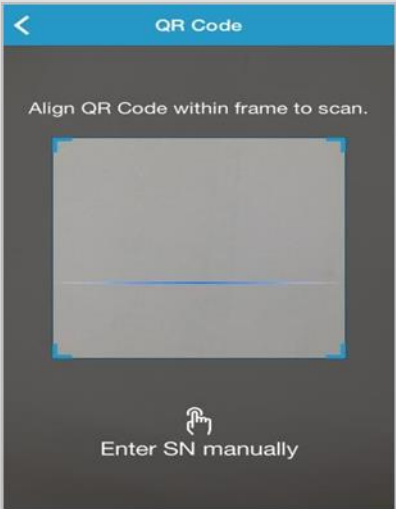

10. Поврзување на сензорот.

Внесување на серискиот број (SN) преку QR  
кодот

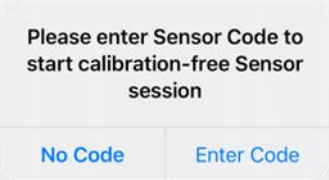

Мануелно внесување на серискиот број (SN)

